

Samsung® Jack™ Version



# Duet™ 2-en-1 MONITOR

Monitoreo Inalámbrico de Episodios  
y TCM en un solo dispositivo

## Guía de inicio rápido para el paciente.

### Lo que necesita para el iniciar:



1. Unidad de control con el cable para el paciente



2. Smartphone



3. Almohadilla de preparación cutánea



4. Paquete de parches de electrodos



5. Pila alcalina "AA"



6. Clip de cinturón para la unidad de control

En esta guía, se explicarán las nociones básicas para iniciar y utilizar su monitor cardíaco Medicomp para el procedimiento de monitoreo cardíaco, según lo indique su médico.

A fin de brindarle a su médico los mejores datos para evaluar su salud cardíaca, es importante que utilice el monitor correctamente y durante el tiempo indicado.

#### Centro de Pacientes Online

[medicompinc.com/patient-center](http://medicompinc.com/patient-center)

- Videos y guías de procedimientos
- Preguntas Frecuentes
- Solicitar suministros de repuesto

**Asistencia Telefónica:** 877-996-5553

 **MEDICOMP**  
Advancing diagnostic cardiology since 1981

## Diagrama del Monitor

### Unidad de Control




### Smartphone



Las ubicaciones de los controles en el Smartphone pueden variar dependiendo del modelo que reciba.

### Carga del Smartphone

El Smartphone tiene que cargarse una vez al día. Es conveniente cargarlo durante la noche al lado de su cama. Conecte el cargador en el Smartphone y enchúfelo a un tomacorriente de pared. Asegúrese de que el tomacorriente no esté controlado por un interruptor de luz. Una luz indicadora roja debe aparecer en la parte superior del Smartphone mientras está cargándose.

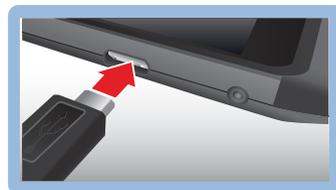

Cargador del Smartphone

tip


Si, en cualquier momento durante el procedimiento, cree que está teniendo una emergencia médica, llame al 911. Continúe llevando puesto el monitor hasta que se lo indique un profesional médico.

QSGSP00560-02B


## Captura y Envío de Síntomas

Cuando experimente un síntoma, o en otros momentos según lo indique su médico, presione el botón **Symptom** (síntoma) para grabar la actividad de su corazón.


El Smartphone mostrará la frase *Recording in Progress* (grabación en curso). Si la pantalla se pone negra para ahorrar energía, presione cualquier tecla para encenderla.

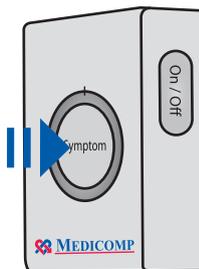

Presione la tecla **multifunción izq.** debajo de *Select Options* (seleccionar opciones). Presione la tecla **Select** (seleccionar) para que aparezca una lista de síntomas de los cuales elegir.

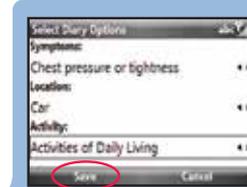

Cuando se observa la frase *Recording in Progress* en el Smartphone, presione la **tecla multifunción izq.** debajo de *Diary* (diario).

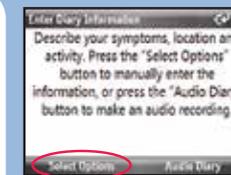

Utilice las teclas de **flechas** para desplazarse en la lista. Presione la tecla **Select** (seleccionar) cuando esté resaltado el síntoma deseado.

Cuando termine, presione la tecla **multifunción izquierda** debajo de *Save* (guardar). Volverá a aparecer la pantalla *Recording* (grabando) o *Monitoring* (monitoreando).

**Anotaciones en el diario:** Es importante que su doctor sepa qué síntoma tuvo, su ubicación y la actividad que estaba g3000 llevando a cabo cada vez que realiza una grabación manual.

tip

Puede utilizar la función incorporada **Diario de audio** para hacer una anotación en el diario mediante una grabación de voz. Simplemente presione la **tecla multifunción derecha** debajo de *Audio Diary* (diario de audio) y siga las instrucciones.


## Devolución del Sistema Duet

Cuando haya finalizado el procedimiento, coloque el dispositivo móvil, la unidad de control, las baterías de la unidad de control, el cargador de la batería y el cable del cargador Duet (junto con todos los parches de electrodos no abiertos y otros accesorios no utilizados) de nuevo en el kit del Duet. Coloque el kit en el sobre de devolución con franqueo pagado incluido en el kit, ciérrelo y luego deposite el paquete en su buzón de correo o cualquier buzón de correo de USPS para que sea entregado nuevamente a Medicomp.

## Propiedad de Medicomp

Todos los equipos son propiedad de Medicomp. Devuélvalos sin demora después de utilizarlos. Los artículos no devueltos podrán ser facturados.

# 1 Preparación de la Piel

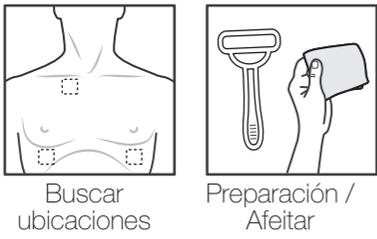


Buscar ubicaciones

Preparación / Afeitar

Sea cuidadoso al preparar la piel para aplicar los parches cutáneos adhesivos (electrodos). Una buena preparación cutánea resultará en mejores trazos de la señal del ECG que, a su vez, serán más fáciles de analizar y evaluar por parte del médico.

Usando como guía la ilustración que aparece abajo, elija zonas del tórax que sean planas y no muy musculares. Evite los pliegues o dobleces cutáneos, la piel irritada y las cicatrices.

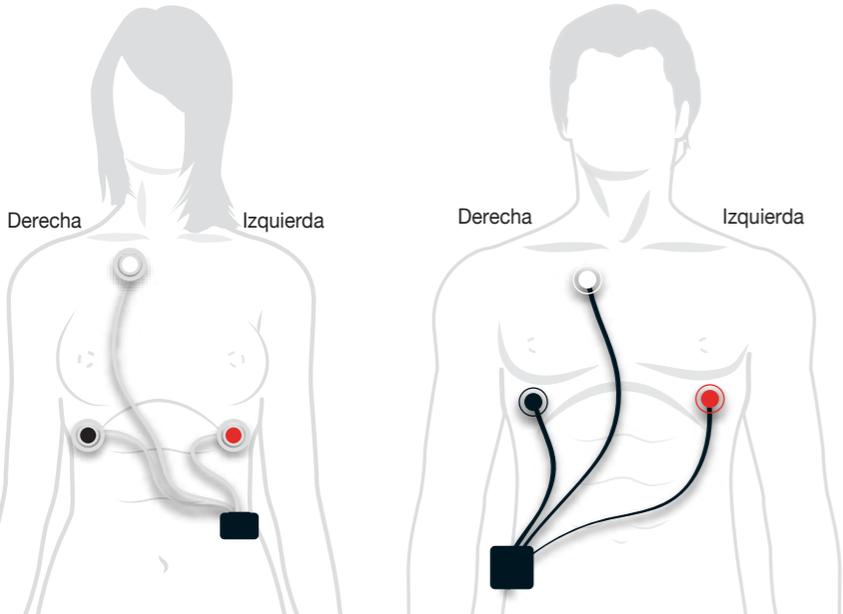

# 2 Aplicación de los Parches de Electroodos



Electrodos de presión


Remueva el papel

Adiera al pecho

Uno por uno, despegue cada electrodo de la cubierta protectora y aplíquelo en el tórax, usando la guía de las ilustraciones y teniendo en cuenta la ubicación de los electrodos de color blanco, rojo y negro.

- tip** Recuerde, "Blanco a la derecha" al aplicar electrodos. Esto le ayudará a recordar colocar siempre el electrodo *blanco* en el lado superior *derecho* de su pecho.
- tip** Cambie los parches de electrodo cada dos días. Cuando vuelva a aplicarlos, cambie ligeramente su ubicación para evitar la irritación de la piel.
- tip** Mantenga la Unidad de Control y el Smartphone cerca el uno al otro tanto como sea posible durante el procedimiento, así se efectuará transferencia de datos.


# 3 Inicio de la Unidad de Control

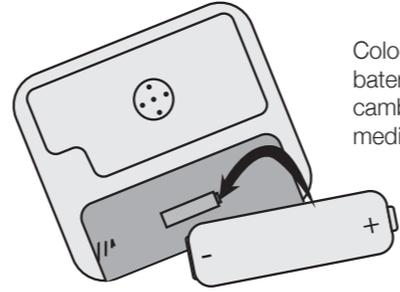

Coloque una batería nueva en el control. Las baterías de las unidades de control deben cambiarse aproximadamente cada un día y medio a dos días.

**tip** Cuando cambie la batería, siempre apague primero la unidad de control manteniendo presionando el botón **On/Off** (encendido / apagado) que se encuentra al costado de la unidad hasta oír tres sonidos seguidos.

Presione y mantenga el botón **On/Off** que se encuentra al costado de la unidad de control hasta que parpadeen las luces del dispositivo y se oiga una señal de tres sonidos.

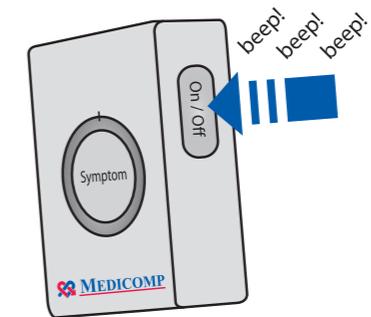


**tip** El porcentaje de la batería de la unidad de control (Pd) y del Smartphone (SP) puede verse en la pantalla del Smartphone.

# 4 Starting the Smartphone



Encienda el Smartphone presionando y soltando el botón **POWER** (encendido) ubicado en la parte superior izquierda.



Presione la **tecla multifunción izquierda** del Smartphone debajo de **Start Procedure** (comenzar procedimiento).

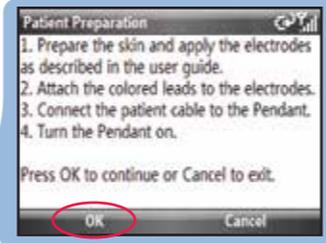

Presione la **tecla multifunción izquierda** debajo de **OK**.

Presione la **tecla multifunción izquierda** debajo de **Accept Settings** (aceptar ajustes) para continuar.

En el caso de tener un marcapasos o de conectar el equipo a un niño, llámenos al 877-996-5553.

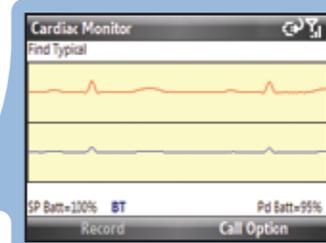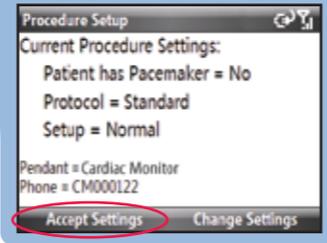

Es posible que aparezca un indicador de ocupado, mientras el Smartphone termina de iniciar y adquiere su señal de ECG.

Cuando el Smartphone haya reconocido su ECG, desaparecerá la forma de onda de ECG y en la pantalla se leerá **Monitoring** (monitoreando).

El procedimiento de su monitoreo cardíaco ahora está en marcha.

