




Duet™ 2-in-1 MONITOR

*Monitoreo Inalámbrico de Episodios
y TCM en un solo dispositivo*

Guía de inicio rápido para el paciente

Lo que necesita para el iniciar:

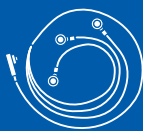


1. Unidad de control con el cable para el paciente



2. Smartphone



3. Almohadilla de preparación cutánea

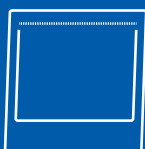

4. Paquete de parches de electrodos



5. Pila alcalina "AA"



6. Clip de cinturón para la unidad de control

En esta guía, se explicarán las nociones básicas para iniciar y utilizar su monitor cardíaco Medicomp para el procedimiento de monitoreo cardíaco, según lo indique su médico.

A fin de brindarle a su médico los mejores datos para evaluar su salud cardíaca, es importante que utilice el monitor correctamente y durante el tiempo indicado.

Centro de Pacientes Online

medicompinc.com/patient-center

- Videos y guías de procedimientos
- Preguntas Frecuentes
- Solicitar suministros de repuesto

Asistencia Telefónica: 877-996-5553



MEDICOMP


Advancing diagnostic cardiology since 1981

Diagrama del Monitor

Unidad de Control




Smartphone

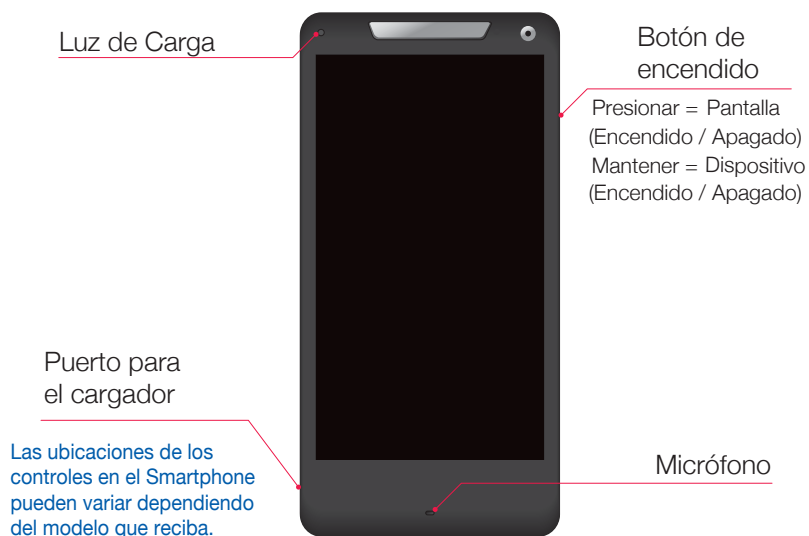

Carga del Smartphone

El Smartphone debe cargarse una vez al día. Es conveniente cargarlo en la noche al lado de la cama. Conecte el cargador en el Smartphone y enchúfelo a un tomacorriente. Asegúrese de que éste no esté controlado por un interruptor. Una luz indicadora roja debe aparecer en la parte superior del Smartphone mientras está cargándose.

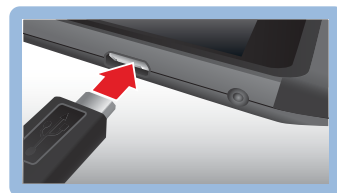


tip

Sí, en cualquier momento durante el procedimiento, cree que está teniendo una emergencia médica, llame al 911. Continúe llevando puesto el monitor hasta que se lo indique un profesional médico.


QSGSP00561-02B

Grabación y Envío de Síntomas



Cuando experimente un síntoma, o en otros momentos según lo indique su médico, presione el botón **Symptom** (síntoma) en la unidad de control o toque la opción **Symptom** en el Smartphone.

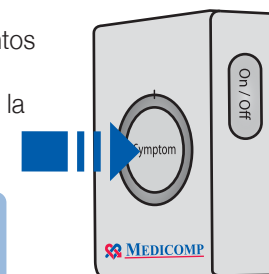

El Smartphone mostrará la frase *Recording in Progress* (grabación en curso). Si la pantalla se pone negra para ahorrar energía, presione cualquier tecla para encenderla.

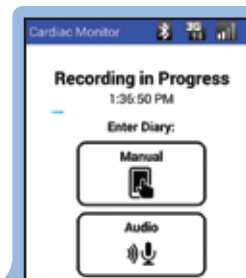

Toque la opción **Manual** o **Audio**.

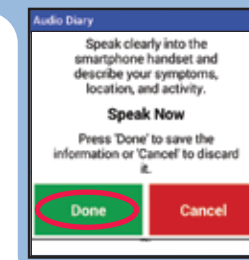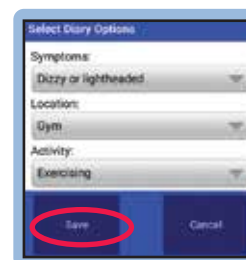

Manual

De las opciones de los menús desplegados, seleccione sus *síntomas, ubicación y actividad*. Toque la opción **Save** (guardar) cuando haya terminado.

Audio

Hable con claridad al micrófono del smartphone y describa sus *síntomas, ubicación y actividad*. Toque la opción **Done** (finalizado) cuando haya terminado.



Sus anotaciones diarias le brindan información importante a su médico. Utilícelas cada vez que realiza registro manual.

Devolución del equipo


Una vez finalizado el procedimiento, coloque el teléfono, la unidad de control y sus baterías; el cargador de la batería y el cable del cargador - junto con los parches de electrodo sin abrir y otros accesorios no utilizados - de vuelta en el kit. Coloque el kit en el sobre de devolución de prepago incluido en el kit, séllelo y luego coloque el paquete en su buzón de correo o en cualquier buzón de USPS para entregarlo de vuelta a Medicomp.

Propiedad de Medicomp


Todo el equipo es propiedad de Medicomp.

Por favor devolver después de su uso. Los artículos no devueltos serán facturados.

1 Preparación de la Piel

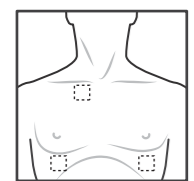



Buscar ubicaciones

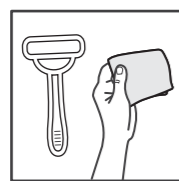


Preparación / Afeitar

Sea cuidadoso al preparar la piel para aplicar los parches cutáneos adhesivos (electrodos). Una buena preparación cutánea redundará en mejores trazos de la señal del ECG que, a su vez, serán más fáciles de analizar y evaluar por parte del médico.


Usando la ilustración siguiente como guía, seleccione las áreas del pecho que son planas y no muy musculares. Evite pliegues o arrugas en la piel, piel irritada y cicatrices.

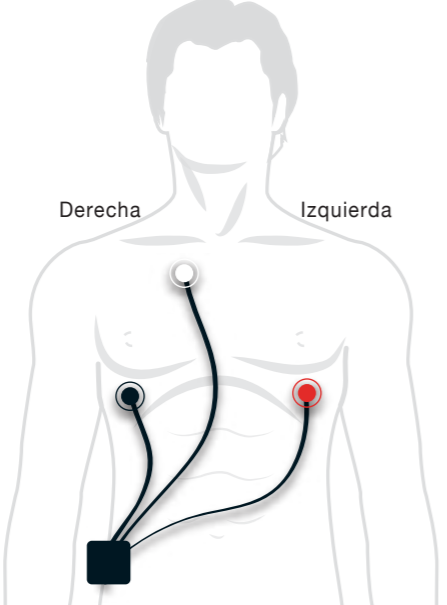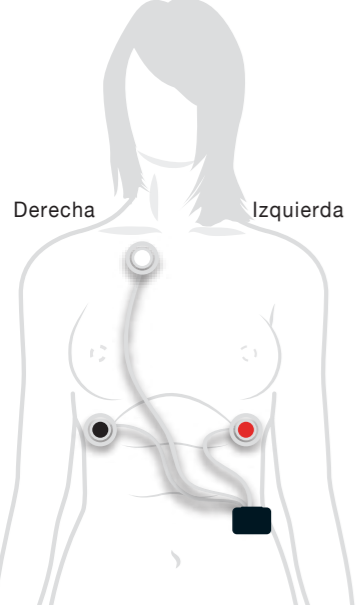


2 Aplicación de los Parches de Electrodo

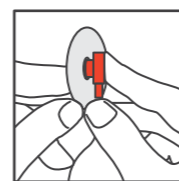

Electrodos de presión

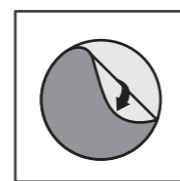

Remueva el papel

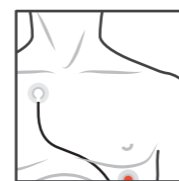

Adiera al pecho

Uno por uno, despegue cada electrodo de la cubierta protectora y aplíquelo en el tórax, usando la guía de las ilustraciones y teniendo en cuenta la ubicación de los electrodos de color blanco, rojo y negro.

tip Recuerde, "Blanco a la derecha" al aplicar electrodos. Esto le ayudará a recordar colocar siempre el electrodo blanco en el lado superior derecho de su pecho.

tip Cambie los parches de electrodo cada dos días. Cuando vuelva a aplicarlos, cambie ligeramente su ubicación para evitar la irritación de la piel.

tip Mantenga la Unidad de Control y el Smartphone cerca el uno al otro tanto como sea posible durante el procedimiento, así se efectuará transferencia de datos.


3 Inicio de la Unidad de Control



Coloque una batería nueva en el control. Las baterías de las unidades de control deben cambiarse aproximadamente cada un día y medio a dos días.


tip Cuando cambie la batería, siempre apague primero la unidad de control manteniendo presionando el botón **On/Off** (encendido / apagado) que se encuentra al costado de la unidad hasta oír tres sonidos seguidos.

Presione y mantenga el botón **On/Off** que se encuentra al costado de la unidad de control hasta que parpadeen las luces del dispositivo y se oiga una señal de tres sonidos.

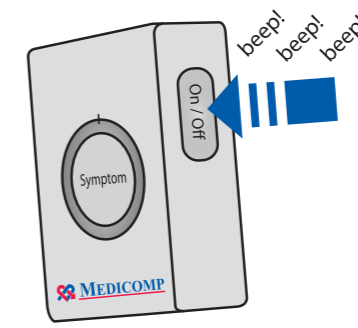

tip El porcentaje de la batería de la unidad de control (Pd) y del Smartphone (SP) puede verse en la pantalla del Smartphone.


4 Inicio del Smartphone

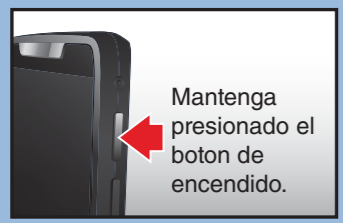

Mantenga presionado el boton de encendido.


Presione **Start Procedure** en el Smartphone.

Espere al Smartphone que ejecute el proceso de inicio hasta que aparezca la pantalla principal.

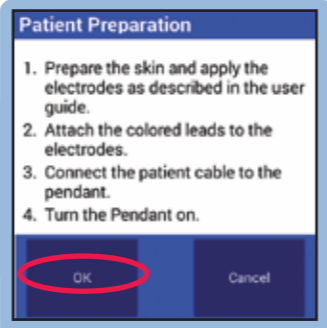


Presione **OK**.

Presione **Accept Settings** para continuar. Si tiene un marcapasos o está conectandolo a un niño, cambie los ajustes en la pantalla Configuración de procedimientos. Si necesita ayuda, llámenos al 877-996-5553.

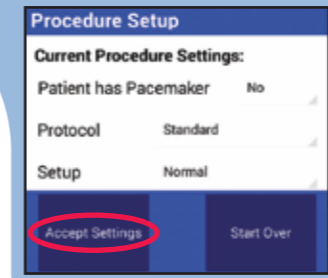

Cuando el Smartphone haya reconocido su ECG, desaparecerá la forma de onda del ECG y en la pantalla se leerá **Monitoring** (monitoreando).

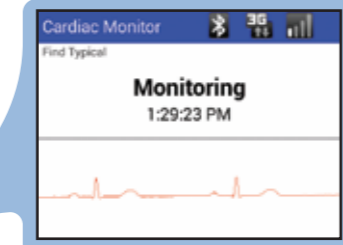

El procedimiento de su monitoreo cardíaco ahora está en marcha.

